

# メディセーフウィズSリモコン

## 「交換ガイド」を用いた交換操作時の注意点

2025 年 11 月

テルモ株式会社

メディセーフウィズSリモコンにつきまして、交換ガイドを用いた交換操作時の注意点について、適正にご使用いただくために、以下の通りご案内申し上げます。

### ■ ご確認いただきたいこと

交換操作完了後に、メインメニュー画面で基礎レートが開始されていることを確認してください。

＜ 確認のポイント ＞【図 1】


- ☑左上：投与モードのアイコンが表示されていること
- ☑中央上：リザーバー内薬液残量表示で人のアイコンと薬液がつながっていること
- ☑中央下：現在の投与情報に投与量が表示されていること

### ■ ご注意いただきたいこと

交換操作中、基礎レート【開始】前に通信切断等が発生し、交換操作完了前にメインメニュー画面に戻った場合、基礎レートが開始されていない状態となります【図2】※。この場合、**必ずメインメニューの【交換】をタップし**、交換ガイドを用いて交換作業を完了してください。（取扱説明書 P66）

※交換ガイド操作中、基礎レート【開始】前にメインメニュー画面に戻ってしまう例

- ① 「通信エラー」発生時「ポンプ通信 ID 選択」から【←（戻る）】でメインメニュー画面に戻った場合
- ② 【再起動】または【電源OFF/ON】でメインメニュー画面を表示した場合

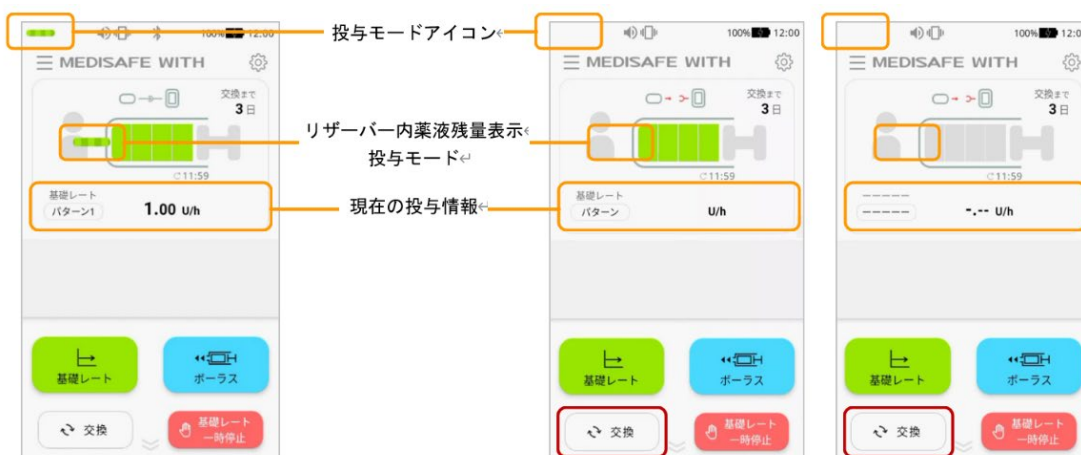

【図 1】

基礎レートが開始されている  
メインメニュー画面

【図 2】

基礎レートが開始されていないメインメニュー画面

### 注 意

左下の【交換】をタップし、再度交換手順を進める※※

- ※※既にカートリッジへのインスリン充電が完了している場合は、「カートリッジをとりだす」画面で【全てをスキップ】をタップし、カートリッジ交換をスキップしてください。
- ※※既にカニューレ充電が完了している場合は、「カニューレ充電開始」画面で【スキップ】をタップし、カニューレ充電を実行しないでください。実施すると、インスリンの過剰投与となり、低血糖になる可能性があります。（取扱説明書 P86）

製品についてのお問合せは、テルモ・コールセンターまでご連絡ください



一般的名称：ポータブルインスリン用輸液ポンプ

販売名：メディセーフウィズ 医療機器承認番号：22900BZX00374000

特定保守管理医療機器

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-44-1 [www.terumo.co.jp](http://www.terumo.co.jp)

©テルモ株式会社 2025 年 11 月作成  
TM-00001374-001