

メディセーフウィズスマートをご使用の方へ

メディセーフウィズSリモコン

バッテリー残量の減りが早いと感じるときの確認点と対処方法

1) Sリモコンとポンプの Bluetooth®通信が常時切断の状態で使用されていないかを確認する

Sリモコンとポンプの Bluetooth 通信が切断された状態で長時間使用すると、リモコン側の消費電力が大きくなり、バッテリー残量の減りが早くなる可能性があります。

メディセーフウィズをご使用中は、常にSリモコンを携帯し（Sリモコンとポンプの距離が1.5m以内）、Sリモコンとポンプの Bluetooth 通信が接続された状態で使用するようしてください。



2) メディセーフウィズリモコン（旧リモコン）とSリモコンでは、バッテリーの持ち時間が大きく異なります

充電タイミングを日常生活の中で決めていただく等で、こまめな充電をお願い致します。

また、充電する際は、満充電になるまで充電をしてください。

| バッテリー・電池の持ち時間 | |
|----------------|---|
| メディセーフウィズSリモコン | 2日以上 ※新品バッテリー、満充電、常温環境で1日平均20分リモコンを使用した場合 |
| メディセーフウィズリモコン | 21日以上 ※新品電池、常温環境で1日平均20分リモコンを使用した場合 |

3) 省電力モードを ON にすると、改善する可能性があります

画面明るさが設定値より-20%、スリープ時間の短縮（20秒または3分で消灯）。

4) Wi-Fi 接続を OFF にすると改善する可能性があります

5) 使用環境温度が著しく低い場合は、電池消耗が早くなる可能性があります

（メディセーフウィズ使用環境温度 5~40℃）



1) ~ 5) を試しても異常が改善されない場合は、テルモ・コールセンターへご連絡ください。



本製品のご使用前に、電子添文、取扱説明書を必ずよく読みの上、記述されている説明に従って使用してください。本製品の詳細は、電子添文および取扱説明書をご参照ください。
 一般的名称：ポータブルインスリン用輸液ポンプ 販売名：メディセーフウィズ 医療機器承認番号：22900BZX00374000 特定保守管理医療機器

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-44-1 www.terumo.co.jp

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。
 ©テルモ株式会社 2024年9月作成
 24T272-1ZZ0.001ZZ2409