

メディセーフウィズスマートをご使用の方へ

メディセーフウィズSリモコン ソフトウェアアップデートマニュアル

メディセーフウィズSリモコン ソフトウェアアップデートについて

2024年6月
テルモ株式会社

この度、メディセーフウィズSリモコンについて、ソフトウェアのバージョンアップを実施いたします。ソフトウェアのバージョンアップに伴い、現在ご使用中のメディセーフウィズSリモコン（以下、Sリモコン）につきましても、最新ソフトウェアへのアップデートの実施をお願い致します。

安定的にご使用いただく上で重要なアップデートとなりますので、必ずソフトウェアアップデートを実施いただきますようお願い申し上げます。

- ・ Wi-Fi 通信下でソフトのアップデートが可能となります。
- ・ アップデートの通知を受け取る為に、Wi-Fi 機能を ON にし、Wi-Fi ネットワークに接続してください。
- ・ 詳細については、中面のアップデート方法をご確認の上、実施をお願い致します。

■ 変更内容

メディセーフウィズSリモコンの安定性とパフォーマンスの向上を目的としたソフトウェアバージョンアップ。

ソフトバージョン情報 変更前：Ver. 2.0.5 → 変更後 Ver. 2.0.6


■ アップデート配信開始時期 2024年7月初旬～

■ アップデート対象

品名	コード番号	バージョンアップ 対象ロット
メディセーフウィズSリモコン	MZ-PM01	230941、231041、231141、240341

■ メディセーフウィズSリモコン ロット確認方法

お手元のリモコンのロットがバージョンアップ対象ロットであることを確認してください。

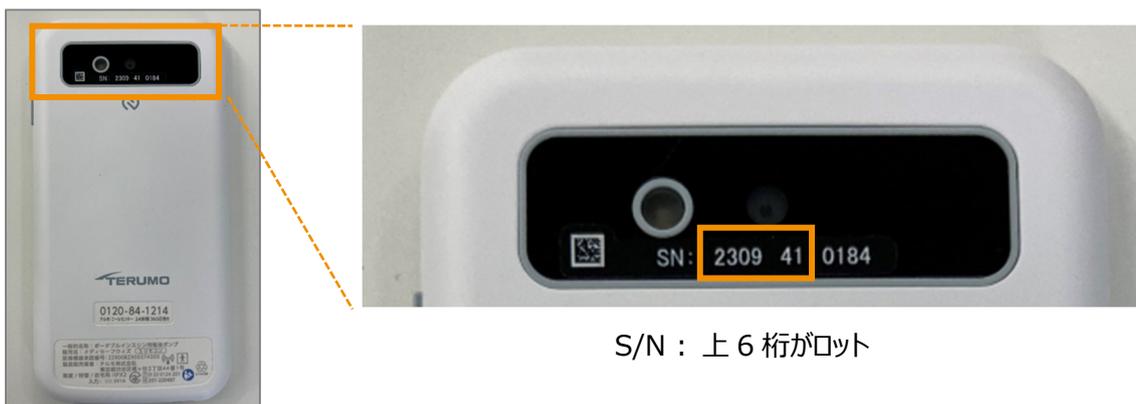


S/N：上6桁がロット

アップデート方法の手順（Wi-Fi ネットワークに接続する方法）

1. Wi-Fi 通信を設定する

1. Sリモコンのメインメニュー画面で [⚙️] をタップし、「設定」メニュー画面で [Wi-Fi] をタップする。
2. Wi-Fi 通信を ON に切り替え、接続する Wi-Fi を選択し、[OK] をタップする。
3. 接続する機器に書かれているセキュリティキー（パスワード）を入力し、[OK] をタップする。
4. 接続に成功すると、接続した Wi-Fi 名の横に「接続済み」と表示されます。

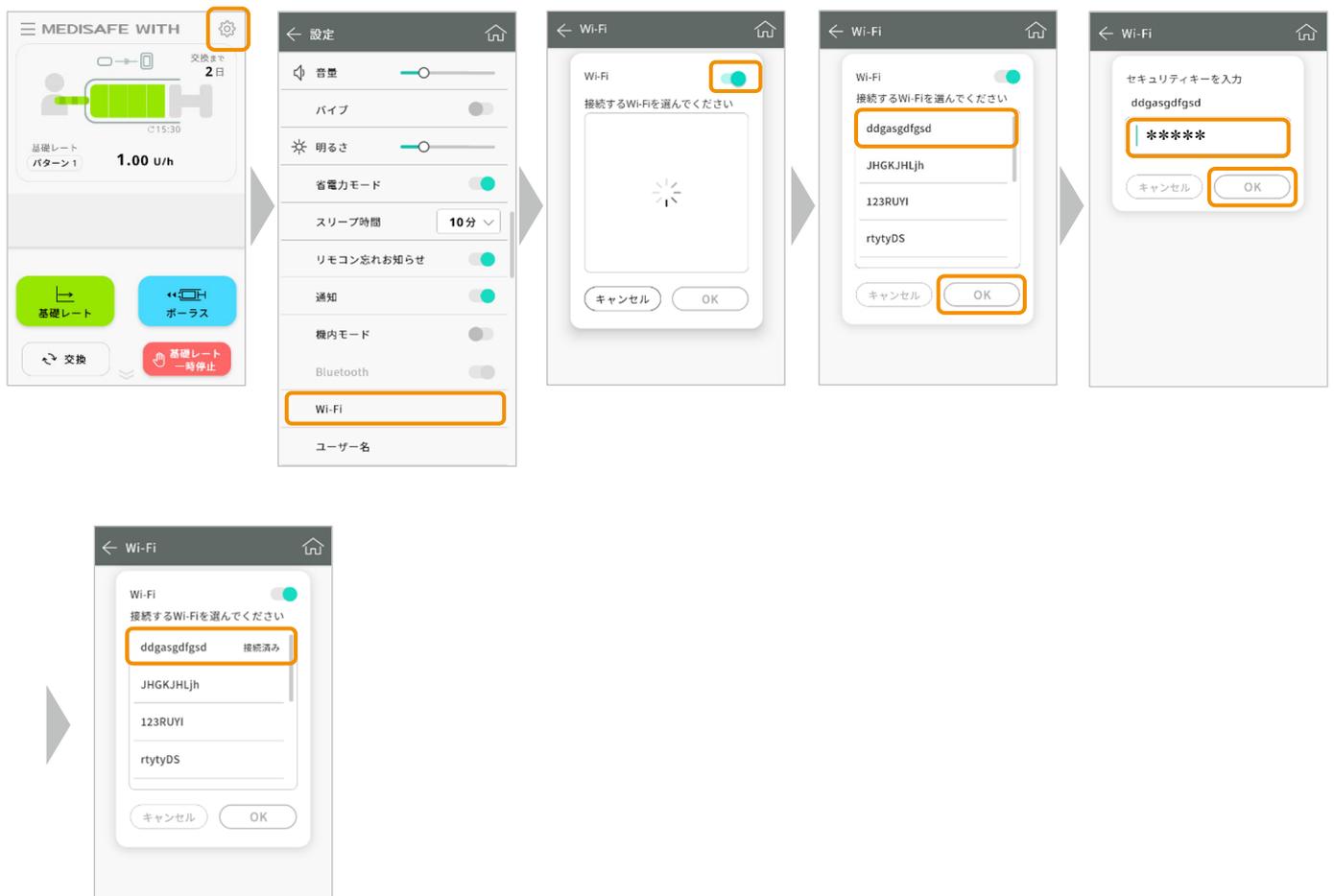

<Wi-Fiネットワーク接続に関する注意事項>

- 5GHz帯のWi-Fiは使用できません。かならず、2.4GHz帯のWi-Fiをご使用ください。
- Wi-Fiのセキュリティモード（WPA等）によっては接続できないことがあります。その場合は、セキュリティモードを変更して接続を試みてください。セキュリティモードの変更方法は、各機器のマニュアルをご確認ください。

2. アップデートを実施する

1. メインメニューにアップデート通知が表示されましたら【アップデート】をタップします。
アップデートを今すぐ行わない場合は、【後で】をタップしてください。
その場合、メインメニュー画面でアップデートに関するお知らせをタップすることでアップデートができます。
2. ソフトアップデート画面で、【アップデート】をタップすると、アップデートが開始されます。
今回のアップデートにかかる時間の目安は1分程度です。
3. アップデート開始され、アップデート完了後ソフトが再起動され、自動的にメインメニュー画面に戻ります。



3. アップデート状況の確認、ソフトバージョンを確認する

1. メインメニュー画面から画面左上の「三」をタップ、サイドメニューを表示し「機器情報」をタップします。
2. 機器情報の「ソフトバージョン」が「2.0.6」になっていることを確認できたら、アップデートの完了です。



<アップデート、Wi-Fi 利用に関する注意事項>

- アップデート通知が表示された場合は速やかにアップデートを行ってください。
- ソフトのアップデートには時間がかかる可能性もあり、アップデート中はポンプ操作ができないため、必要な投与操作を終わらせてから、血糖値が安定している状態で行ってください。
- リモコンの電池残量が20%以上の状態で行ってください。
- アップデート中および再起動中は、リモコンのバッテリーを取り外したり、電源を切ったりしないで下さい。

参考 モバイルインターネット接続を利用する場合は（インターネット共有）

ご自身のスマホを用いてテザリング「インターネット共有」に接続する

ご自身のスマホで「インターネット共有」を有効にして、ご自身のスマホのモバイルインターネット接続を使用（ご自身のスマホとSリモコンをWi-Fiを用いてテザリング※1）して、アップデートを実施することも可能です。

※1：携帯通信会社によっては、テザリングに制限が設けられていたり、追加料金が発生したりすることがあります。詳細はご利用の携帯通信会社にご確認ください。

iPhoneの場合 iPhoneでのテザリングの設定は以下の手順です。手順はiOS®14を例としており、機種によって異なる場合があります。

1. ホーム画面から「設定」をタップ
2. 「モバイル通信」をタップ
3. 「インターネット共有」をタップ
4. 「ほかの人の接続を許可」をオンに切り替え
5. Sリモコン側に表示された該当する回線名を選択し、「Wi-Fiのパスワード」をSリモコンに入力する

Android™の場合 Android™でのテザリングの設定は以下の手順です。 ※2：機種によって名称等が異なる場合があります。

1. ホーム画面から「設定」をタップ
2. 「ネットワークとインターネット※2」をタップ
3. 「テザリング※2」をタップ
4. Wi-Fiテザリングをオンにする
5. Sリモコン側に表示された該当する回線名を選択し、「Wi-Fiのパスワード※2」をSリモコンに入力する

Sリモコンのアップデート手順に関して、ご不明点やお問合せは、テルモ・コールセンターまでご連絡ください。



本製品のご使用前に、電子添文、取扱説明書を必ずよく読みの上、記述されている説明に従って使用してください。本製品の詳細は、電子添文および取扱説明書をご参照ください。

一般的名称：ポータブルインスリン用輸液ポンプ 販売名：メディセーフウィズ 医療機器承認番号：22900BZX00374000 特定保守管理医療機器

iPhoneは、Apple Inc.の商標です。

Androidは、米国Google LLCの商標または登録商標です。

iOSは米国およびその他の国におけるCisco System, Inc. および/またはその関連会社の商標または登録商標です。

テルモ株式会社 〒151-0072東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1 www.terumo.co.jp

©テルモ株式会社 2024年6月作成

24T173-1ZZ0.001ZZ2406