



# Dexcom Follow アプリ 概要説明リーフレット



## 概要

患者さんのグルコースデータの閲覧や、グルコース状態のアラート/アラーム通知を受信するためのアプリです。  
アラート/アラーム通知の設定を変更することもできます。  
患者さん1人につき、最大10人まで共有(フォロー)できます。

\*Dexcom G6 アプリ、Dexcom Follow アプリを使用するには、互換性のあるスマートデバイスが必要です。データ共有にはインターネット接続が必要です。



## 使用の流れ

### 1. Dexcom G6 アプリの設定

- (1) Dexcom G6 アプリのホーム画面左上の「Share」をタップする。
- (2) 「フォロワーを追加する」をタップする。
- (3) フォロワーのニックネーム、メールアドレスを入力し、「次へ」をタップする。
- (4) テレンドグラフビュー画面で設定を確認し、「次へ」をタップする。
- (5) フォロワーの設定画面で、フォロワーへ通知する内容の設定を確認し、「次へ」をタップする。
- (6) 招待状のレビュー画面で設定内容を確認し、「招待状の送信」をタップする。


### 2. Dexcom Follow アプリの設定

- (1) Dexcom Follow アプリをダウンロードする。
- (2) アプリについての説明を確認し、「理解しました」をタップする。
- (3) 使用許諾契約書を確認し、利用規約、プライバシーポリシーの同意欄にチェックを入れる。
- (4) 画面の案内にそって進み、通知を許可する。
- (5) Dexcom から届くメールを確認し、メール文中の「Start Following」をタップする。
- (6) アプリが起動したら内容を確認し、「承諾」をタップする。
- (7) 通知設定を確認し、「フォローの開始」をタップする。


# 画面の見かた

ダッシュボード(共有者一覧の画面)から確認したい共有者をタップすると、選択した共有者のグルコース測定値を確認できます。

## ダッシュボード(共有者一覧の画面)

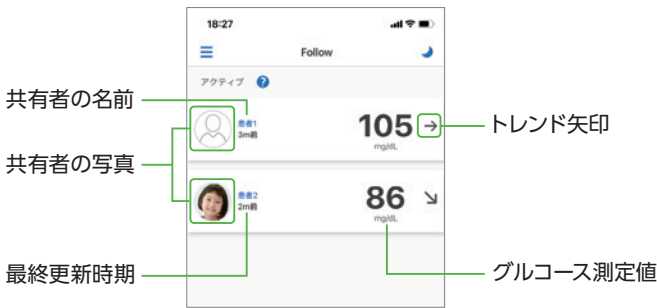

## トレンドグラフ

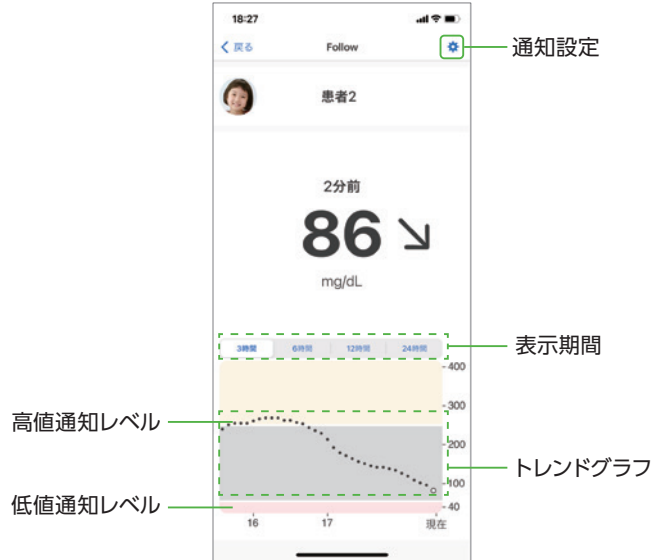

## トレンドグラフビューの許可 (Dexcom G6 アプリ)

共有者のDexcom G6 アプリ上で、フォロワーがトレンドグラフを見ることができるか設定ができます。

### オフ

ダッシュボードのみ閲覧可




### オン

ダッシュボード/トレンドグラフ閲覧可



## 横向き画面

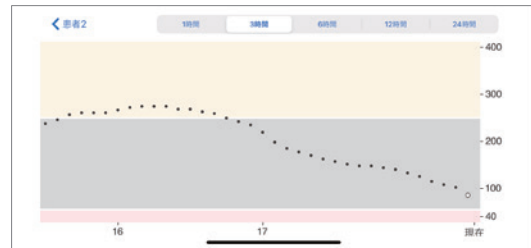

# 通知設定の変更方法

共有者(Dexcom G6 アプリ)は、フォロワーを招待するときに通知設定を行います。

フォロワー(Dexcom Follow アプリ)は共有者からの招待を承諾した後、いつでも受け取る通知の設定を変更できます。



共有者の名前と写真を設定できます。

### 通知の種類

通知	内容	通知するタイミング	繰り返し(リピート)通知
緊急低値通知	40 ~ 55mg/dLごとに設定可能	—	—
低値通知	グルコース測定値が設定値より低い時 (60 ~ 100mg/dLで5mg/dLごとに設定可能)	0分 ~ 2時間で 5分ごとに設定可能	0分、30分、45分、 1時間、1時間30分、2時間
高値通知	グルコース測定値が設定値より高い時 (120 ~ 400mg/dLで10mg/dLごとに設定可能)	0分 ~ 6時間で 5分ごとに設定可能	0分、30分、45分、1時間、1時間30分、 2時間、3時間、4時間、5時間、6時間
データなし通知	共有者のDexcom G6 アプリが測定データを取得していない場合に通知	30分 ~ 6時間で 5分ごとに設定可能	—

トレンドグラフの高さを300mg/dLまたは400mg/dLに設定できます。

● 本カタログに掲載の画面画像はイメージです。

一般的名称: グルコースモニタシステム 販売名: Dexcom G6 CGMシステム 医療機器承認番号: 30200BZ100004000  
本製品のご使用前に、添付文書、取扱説明書を必ずよくお読みの上、記述されている説明に従って使用してください。  
本製品の詳細は、添付文書および取扱説明書をご参照ください。



販売業者 テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-44-1 www.terumo.co.jp

Dexcomは米国Dexcom, Inc.の登録商標です。  
Dexcom G6, Dexcom Share, Dexcom Followは米国Dexcom, Inc.の商標です。  
記載されている社名、各種名称は、  
テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。  
© テルモ株式会社 2021年9月  
21T287-1KL3MM2107