

Q4 血液を吸引しても測定が始まらないときは？

→ 血液の量が少ないことが原因です。

「血液をつける」が表示されたままで測定が始まらないときは、




- 指先の血液を拭き取り、新しい測定用チップをつけて最初から測定しなおしてください。
- 再び穿刺(せんし)した後、血液を約 2.5 ミリの球状にしてから吸引してください。

ここがポイント！


○ 血液量が十分

血液が測定用チップ内の試験紙まで広がっている

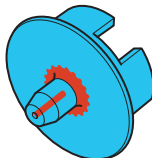

× 血液量が少ない

血液が測定用チップ内の試験紙まで届いていない

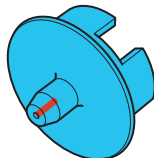

「血液をつける」が表示されたままのときは、たたいたり、ゆすったりして、無理に測定を開始しないでください。正しい測定値が得られないことがあります。